

WillowWood[®]

ALPHA[®]

Manga de suspensión Alpha Classic[®] con tejido original

Instrucciones para el paciente

COLOCACIÓN

Oriente la manga de suspensión Alpha Classic con tejido original de forma que la cubierta parcial de tela en la parte interior de la manga de suspensión cubra la zona del borde del encaje, especialmente en la zona anterior. El área de gel expuesta por encima y por debajo de la cubierta parcial de tela debe estar en contacto con la piel (o el forro) y el encaje, respectivamente.

LIMPIEZA

Recomendamos mantener la superficie del gel limpia y libre de residuos. Después de la limpieza, cuelgue la manga de suspensión para que se seque.

DESINFECCIÓN SEMANAL

Si la manga de suspensión está desgastada hasta el punto en el que la porción de gel de esta entra en contacto con la piel, entonces esta área debe desinfectarse una vez por semana.

1. Humedezca un paño limpio y suave con una pequeña cantidad de alcohol etílico o isopropílico.
2. Limpie suavemente el lado de gel de la manga de suspensión con el paño.
3. Enjuague el alcohol de la manga de suspensión con agua.
4. Cuelgue la manga de suspensión para que se seque.


Nota: No sumerja la manga de suspensión en alcohol etílico o isopropílico. El contacto extendido con grandes cantidades de alcohol etílico o isopropílico endurecerá la manga de suspensión.

ALMACENAMIENTO

Cuando la prótesis no vaya a utilizarse por algunos días, la porción distal de la manga de suspensión puede dejarse en el encaje.

No DEJE la manga de suspensión en el encaje con la mitad superior de esta recogida sobre el encaje, pues la manga de suspensión se ensanchará.

Si la prótesis no se utilizará por cinco días o más, es necesario retirar, limpiar y guardar la manga de suspensión en un lugar limpio y seco.

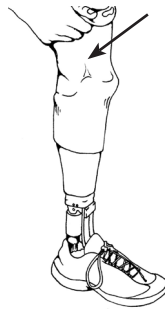

Si la manga de suspensión se deja en la prótesis, la orilla proximal de la manga de suspensión debe colocarse como se muestra y NO debe recogerse sobre el encaje.



Los productos Alpha pueden derretirse o quemarse si se exponen a altas temperaturas o llamas. No exponga su producto Alpha a estas condiciones.



Este producto Alpha está destinado para uso de un solo paciente. El uso de este producto con múltiples pacientes podría dar lugar a la contaminación cruzada entre pacientes.



ADVERTENCIA: Para evitar riesgo de asfixia, mantenga este producto fuera del alcance de bebés o niños.

WillowWood[®]

The Ohio Willow Wood Company
15441 Scioto Darby Road
Mt. Sterling, OH 43143
Teléfonos 740.869.3377/800.848.4930
Fax 740.869.4374 www.willowwoodco.com
Patente www.willowwoodco.com/education-and-resources/patents



Ohio Willow Wood Company B.V.
Keizersgracht 62/64
1015 CS Amsterdam
Países Bajos

